

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成30年2月27日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号：300263
作業年月日	平成30年2月27日	作業時間：1.5 Hr
顧客名	三かば内科医院 様	TEL：0824-44-2025
所在地	広島県三次市三良坂町三良坂1096-3	ご担当 様
販売店	ティースアルフィサ (株)	ご担当 様
納入年月日	平成26年9月8日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

排水異常発生、(オゾン分解不良)

不具合原因、作業内容

排水フィルター交換、定期交換部品の交換 実施。(¥2,700-)

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 305	エアライン	正常 ☒ 33~34
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 453
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

動作点検後、特記内容は

装置情報	交換後運転回数：154	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒：454	殺菌/消毒+7L：108
	リークチェック：7	自己洗浄：529	7L単独：0	エア単独：469

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	排水フィルター	旧型	☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H30年 2月 27日

ご署名

高島 敦久 印

修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者

作業者

増原

福田

Ver.3.1