

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成30年2月27日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：30036 A
作業年月日	平成30年2月27日		作業時間：1.5 Hr
顧客名	三次地区医療センター様		TEL：0824-62-1103
所在地	広島県三次市十日市東3-16-1		ご担当 倉本様
販売店	アイースアルビス(株)		ご担当 様
納入年月日	平成25年6月3日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

タッチパネル作動不良、消毒履歴が消失。

不具合原因、作業内容

タッチパネル交換実施。(¥140,000-)

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 399	エアライン	正常 ☒ 32~33
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 3/8
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

交換後、特に問題なし

装置情報	交換後運転回数： <u>2783</u>	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： <u>3860</u>	殺菌/消毒+アル： <u>2770</u>
	リークチェック： <u>2783</u>	自己洗浄： <u>977</u>	アルコール単独： <u>23</u>	エア単独： <u>2</u>

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐		タッチパネル	03-	☒	1
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H30年2月27日

ご署名

倉本 富美



修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者

作業者

曾根

福岡

Ver.3.1