

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 29 年 12 月 19 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300732
作業年月日	平成 29 年 12 月 19 日		作業時間：1.0 Hr
顧客名	えきや外科クリニック 様		TEL：084-976-2222
所在地	広島県福山市駅家町近田 234-2		ご担当 様
販売店	(株) ミーグ		ご担当 補正 様
納入年月日	平成 27 年 12 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
H 29 年度 定期メンテナンス 実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 290	エアライン	正常 ☒ 33~34
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 38/
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.79 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
特に問題ありません。			

装置情報	交換後運転回数：61	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：6	殺菌/消毒+アル：101
	リークチェック：34	自己洗浄：67	アルコール単独：0	エア単独：1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコール検知器	200	☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2017 年 12 月 19 日

〒740-1101 福山市駅家町近田234-2
医療法人 えきや外科クリニック

ご署名

安藤 正 印



修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者	作業者