

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成29年11月21日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300374
作業年月日	平成29年11月21日		作業時間：2 Hr
顧客名	鴻城医院 様		TEL：0839-22-0166
所在地	山口県山口市後河原181		ご担当 様
販売店	(有) ヤマテエムシー		ご担当 佐々木 社長 様
納入年月日	平成26年11月10日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3年2回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E-7-異常、保守点検
(E107, F105)

不具合原因、作業内容

保守点検部品交換 (コントロール基盤含む)

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 302	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 354
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

E-7-異常対応、その他異常なし。不具合は修理完了にて対応済み。
25-483

装置情報	交換後運転回数：276	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒：151	殺菌/消毒+7L：762
	リークチェック：54	自己洗浄：687	アルコール単独：3	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	3
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	27-4-10 基盤		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	302-10 基盤		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H29年11月21日

ご署名 金子 由香里

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者 作業者

金子 由香里