

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成30年4月19日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号：100652
作業年月日	平成30年4月19日	作業時間：160 Hr
顧客名	神37内科 様	TEL：084-925-4567
所在地	広島県福山市上町2-10-29	ご担当 様
販売店	福山医療器(株)	ご担当 山口 様
納入年月日	平成25年3月12日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5年5回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

H30年定期メンテナンス実施。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題なし

装置情報	交換後運転回数：693	更新（リセット）実施・未実施 ☒	殺菌/消毒：991	殺菌/消毒+アル：1555
	リークチェック：0	自己洗浄：263	アルコール単独：3	エア単独：3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
ポン水濃度計用フィル		☒	1	アルコールキャップ	211-1	☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

福山市上町2丁目10-29

医療法人社団まこと会

神37内科医院

福山医療器(株)



ご署名

平成30年4月19日

福山市上町2丁目10-29

医療法人社団まこと会

神37内科医院

福山医療器(株)

日

印

印

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者

作業者

福山医療器(株)

Ver.3.1