

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 30 年 1 月 30 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300441
作業年月日	平成 30 年 1 月 30 日		作業時間：2.5 Hr
顧客名	三日月病院 様		TEL：0835-22-1110
所在地	山口県防府市下茶屋町3-27		ご担当 様
販売店	(株) 新緑ガス商会		ご担当 堀村 様
納入年月日	平成 26 年 2 月 2 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 3 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検、排水場所変更、セーフ異常

不具合原因、作業内容

- 保守点検部品の交換（排水フック等）
1. 床排水 → シンク排水へ変更。
2. コントローラ基板交換（セーフ異常改善）

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 3/0
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

終了は異常なし。

装置 情報	交換後運転回数：1104	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：1801	殺菌/消毒+7L：1787
	リークチェック：795	自己洗浄：459	アルコール単独：74	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	2
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	302-W 40, 70		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	2250-10 基板		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

30 年 1 月 30 日

ご署名 廣江 洋子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者	作業者
	