

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成30年2月6日

|       |                                                                                                                                   |                                                            |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                             |                                                            | 製造番号：300804      |
| 作業年月日 | 平成30年2月6日                                                                                                                         |                                                            | 作業時間：2 Hr        |
| 顧客名   | 園病院様                                                                                                                              |                                                            | TEL：0832-82-0020 |
| 所在地   | 山口県下関市小月町2-15-20                                                                                                                  |                                                            | ご担当 様            |
| 販売店   | アズマテック                                                                                                                            |                                                            | ご担当 明石 様         |
| 納入年月日 | 平成28年8月3日                                                                                                                         | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品              |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                               |                                                            |                  |
| 出張・引取 | 修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |                                                            |                  |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

液体の逆流 74-24

不具合原因、作業内容

パネ、コントロール基板交換 (無償)

| 点検項目     |    |                                                                 |              |    |                                                 |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> バル数 373     |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
|          |    | <input type="checkbox"/>                                        |              |    |                                                 |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

この度は、大変ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんでした。  
部品交換にて対応を致しました。宜しく願っております。

|          |          |    |            |     |        |    |           |    |
|----------|----------|----|------------|-----|--------|----|-----------|----|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： | 45 | 更新（リセット）実施 | 未実施 | 殺菌/消毒： | 87 | 殺菌/消毒+7L： | 65 |
|          | リークチェック： | 80 | 自己洗浄：      | 41  | 7L単独：  | 14 | エア単独：     | 0  |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                       | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|--------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input type="checkbox"/> |    | 吸盤           |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| 排水栓          |       | <input type="checkbox"/> |    | 接続コネクタ：水槽側   |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計      |       | <input type="checkbox"/> |    | 接続コネクタ：チューブ側 |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input type="checkbox"/> |    | ポンプ          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾンセンサー      |       | <input type="checkbox"/> |    | コントロール基板     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。  
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

30年2月6日

ご署名 安本 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店  
広島県広島市西区庚午中4-10-36  
TEL：082-275-0740

| 責任技術者 | 作業者 |
|-------|-----|
| 増原    | 板垣  |