

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20180530
発行日：平成30年 5 月 30 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300113
作業年月日	平成 30 年 5 月 30 日		作業時間： Hr
顧客名	原田外科医院 様		TEL： 0837-52-0756
所在地	山口県美祢市大嶺町東分322-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	平成 25 年 11 月 30 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☒ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
オゾン水生成注意 (E110) オゾン水生成異常 (E207)			
原水汚水異常 (E209) 対応			
不具合原因、作業内容			
・機械側に異常はありませんでした。			
・「オゾン水生成注意、異常」対策 …… 酸素流量を 0.76→0.88 に上げて 水生成量で上げました。			
・「原水汚水異常」対策 …… プログラム設定値を 4→16 にしました。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒ スコップで入れて確認	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 456
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
水質が刻々と変化しているようです。消毒前にリフテックにて水を捨ててください。			
改善されない場合は 給水フィルターの設置をご検討下さい。			

装置 情報	交換後運転回数： 90	更新（リセット）実施・未実施 ☒	殺菌/消毒： 256	殺菌/消毒+アル： 1172
	リークチェック： 12	自己洗浄： 946	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ；水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ；チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐				☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄	30 年 5 月 30 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 原田 菊夫	

修理業者	株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シバウラ)	責任技術者	作業者
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6			H30.S.30
TEL:086-944-6528			中澤