

保守点検・修理 報告書

管理 No. 29806/2-1
発行日：平成30年 6 月 12 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：	300035 B
作業年月日	2018 年 6 月 12 日		作業時間：	1.5 Hr
顧客名	三次地区医療センター 様		TEL：	0824-62-1103
所在地	広島県三次市十日市東3-16-1		ご担当	倉本 様
販売店	ティーエスアルフレッサ㈱三次支店 様		ご担当	秋山 様
納入年月日	2013 年 6 月 3 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5 年 5 回目 定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
・保守点検	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 残圧 12 MPa	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 377
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項	
異常ありませんでした	

装置	交換後運転回数： 1660	更新(リセット) ☒ 未実施	殺菌/消毒： 4762	殺菌/消毒+7L： 3519
情報	リークチェック： 3507	自己洗浄： 1218	7L単独： 86	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		吸盤		☐	
排水栓		☒		接続コネクタ：水槽側		☒	
オゾン水濃度計		☒		接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒		ツメパネル (ナット型)		☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者	作業者
中澤	H30-6-12 中澤