

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 30 年 7 月 2 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100648
作業年月日	平成 30 年 7 月 3 日		作業時間： / Hr
顧客名	水入クリニック 様		TEL： 082-926-0216
所在地	広島市東区牛田早稲田1丁目23-8		ご担当 様
販売店	藤井医療器株式会社 様		ご担当 様
納入年月日	平成 25 年 8 月 9 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
定期保守点検			
不具合原因、作業内容			
上記同様			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 554
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
特に問題はありませんでした。			
次回 ケーパネル、マニホールドチューブの交換をお勧め致します。			

装置 情報	交換後運転回数： 154	更新（リセット）実施 ・ 未実施	殺菌/消毒： 38	殺菌/消毒+7L： 763
	リークチェック： 2	自己洗浄： 636	7Lコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	〒732-0062 広島市東区牛田早稲田1-23 医療法人 水入クリニック 理事長・院長 水入 寛印純 ご署名
---	---

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL：082-275-0740

責任技術者	増原
作業者	