

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 30 年 3 月 12 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：301203
作業年月日	平成 30 年 3 月 12 日		作業時間：1.0 Hr
顧客名	祇園わだ内科クリニック 様		TEL：082-274-2777
所在地	広島市中区南区祇園 3-13-28		ご担当 様
販売店	(株) セイブル		ご担当 清水 様
納入年月日	平成 29 年 3 月 13 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴 → 特記事項			
不具合原因、作業内容			
n 30年定期メンテナンス実施。(今回限リ、サ-ビス)			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 319	エアライン	正常 ☒ 35~36
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 418
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
動作点検後、後に問題なし。			

装置情報	交換後運転回数：791	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒：259	殺菌/消毒+7L：532
	リークチェック：281	自己洗浄：257	アルコール単独：60	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	平成 30 年 3 月 12 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	祇園わだ内科クリニック 和田慶洋 印
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者	作業者
増	福