

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ■ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S □		製造番号:	100782
作業年月日	2018 年 8 月 28 日		作業時間:	/ Hr
顧客名	そだクリニック 様		TEL:	0827-21-0100
所在地	山口県岩国市山手町1-2-6		ご担当	様
販売店	海井医科器械株式会社 様		ご担当	海井 様
納入年月日	2013 年 6 月 26 日	保証期間 内 □ 外 ■	付属品	
作業区分	保守点検 ■ 総合点検 □ 5 年 5 回目 定期点検シール記入 ■			
出張・引取	修理 □ 点検のみ □ その他 □ 修理表示貼付 □			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・保守点検

不具合原因、作業内容

・保守点検部品交換

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☐	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・修理異常なし

装置情報	交換後運転回数: 654	更新(リセット)実施・未実施	殺菌/消毒: 384	殺菌/消毒+アル: 2443
	リークチェック: 0	自己洗浄: 1007	アルコール単独: 7	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	2
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H30 年 8 月 28 日

ご署名



修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	松本