

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成30年6月21日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号：100726
作業年月日	平成30年6月21日	作業時間：2 Hr
顧客名	斎藤医院 様	TEL：08388-2-2838
所在地	山口県阿武郡阿武町奈古2860-1	ご担当 様
販売店	富エファルメンテリカル(株) 山口営業所	ご担当 鈴木 様
納入年月日	平成25年5月21日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5年5回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

保守点検部品の交換、給水フィルター交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 302	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 385
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

交換品に不具合はなかったと確認済みです。

装置情報	交換後運転回数：103	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：243	殺菌/消毒+7L：618
	リークチェック：0	自己洗浄：117	アルコール単独：1	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	2
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
ワゴン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	1	給水フィルター		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド（兼給水）		☒	1

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

平成30年6月21日
山口県阿武郡阿武町大字奈古2860番地1

医療法人 斎藤医院

ご署名 理事長 斎藤 稔

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者 作業者

増原 拓也

Ver.3.1