

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 30 年 5 月 14 日

|       |                                                                                                                           |                                                            |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                     |                                                            | 製造番号： 300444      |
| 作業年月日 | 平成 30 年 5 月 15 日                                                                                                          |                                                            | 作業時間： 2 Hr        |
| 顧客名   | 生協宇摩診療所 様                                                                                                                 |                                                            | TEL： 0896-25-0114 |
| 所在地   | 愛媛県四国中央市寒川2912-1                                                                                                          |                                                            | ご担当 様             |
| 販売店   | 高松帝産株式会社                                                                                                                  |                                                            | ご担当 毛利 様          |
| 納入年月日 | 平成 27 年 2 月 9 日                                                                                                           | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                            |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |                                                            |                   |

|                                                                   |                                                                    |              |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                                   |                                                                    |              |                                                    |
| ヒーター異常                                                            |                                                                    |              |                                                    |
| 不具合原因、作業内容                                                        |                                                                    |              |                                                    |
| プログラム更新及び定期保守作業を行いました。<br>ヒーター異常はプログラム更新とオゾン分解触媒の交換で<br>改善しております。 |                                                                    |              |                                                    |
| 点検項目                                                              |                                                                    |              |                                                    |
| フタロック                                                             | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                                                             | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                                                          | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルス数 454    |
| オゾンセンサ                                                            | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                                                             | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                                                             | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                                                            | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm |
| 水漏れ確認                                                             | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                                                                | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー                                                               | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                                                           | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項                                         |                                                                    |              |                                                    |
| その他問題はありませんでした。                                                   |                                                                    |              |                                                    |

|          |              |                                                                              |            |               |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 295 | 更新（リセット）実施 <input checked="" type="checkbox"/> ・未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌/消毒： 778 | 殺菌/消毒+7L： 348 |
|          | リークチェック： 0   | 自己洗浄： 182                                                                    | アルコール単独： 7 | エア単独： 2       |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 排水プラグ        |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| お客様ご確認署名欄                         | 30 年 5 月 15 日 |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。   | 生協宇摩診療所 印     |
| ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 |               |
| ご署名                               |               |

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店  
広島県広島市西区庚午中4-10-36  
TEL：082-275-0740

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       | 増原  |