

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成30年 5 月 18 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ■ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S □		製造番号： 100653
作業年月日	2018 年 5 月 18 日		作業時間： 1.0 Hr
顧客名	かがわファミリークリニック 様		TEL： 082-875-0012
所在地	広島県広島市安佐南区西原2丁目32-19		ご担当 様
販売店	藤井医療器株式会社 様		ご担当 和田 様
納入年月日	2013 年 4 月 24 日	保証期間 内 □ 外 ■	付属品
作業区分	保守点検 ■ 総合点検 □ 5 年 1 回目 定期点検シール記入 ■		
出張・引取	修理 □ 点検のみ □ その他 □ 修理表示貼付 □		

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
・保守点検					
不具合原因、作業内容					
上記に同じ ・アルコール70%、オゾン水42-1、各1本ずつ交換					
点検項目					
フタロック	正常	✓	殺菌槽 LED	正常	✓
酸素ライン	正常	✓	エアライン	正常	✓
アルコールライン	正常	✓	オゾン水濃度計動作	正常	✓
オゾンセンサ	正常	✓	排水栓、排水ライン	正常	✓
給水ライン	正常	✓	細管送水ライン	正常	✓
濃度計流量	正常	✓	排気ライン	正常	✓
水位センサー	正常	✓	オゾン濃度	正常	✓
水漏れ確認	正常	✓	異常音、振動	正常	✓
清掃	正常	✓	電源コード	正常	✓
トレイ	正常	✓	殺菌チューブ類	正常	✓
殺菌槽コネクタ	正常	✓	マニホールド周辺チューブ	正常	✓
		□			□
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					
・特に異常ありません。きれい使って頂いております。					

装置	交換後運転回数： 916	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 43	殺菌/消毒+アル： 873
情報	リークチェック： 0	自己洗浄： 0/3	アルコール単独： 1	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		✓	1	吸盤		✓	1
排水栓		✓	1	接続コネクタ；水槽側		✓	2
オゾン水濃度計		✓	1	接続コネクタ；チューブ側		✓	2
オゾン水濃度計用フィルタ		✓	1	アルコール70%		✓	1
オゾンセンサー		✓	1	マニホールドチューブ		✓	1

お客様ご確認署名欄		1730年 5 月 18 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。		西本 同子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL：082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	松本