

保守点検・修理 報告書

管理 No. 180528
発行日：平成30年 5 月 28 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ■ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S □		製造番号：	100794
作業年月日	2018 年 5 月 29 日		作業時間：	1.0 Hr
顧客名	原田医院	様	TEL：	082-877-7581
所在地	広島県広島市安佐南区川内4-15-18		ご担当	様
販売店	富士フィルムメディカル(株)	様	ご担当	大番 様
納入年月日	2013 年 7 月 30 日	保証期間 内 □ 外 ■	付属品	
作業区分	保守点検 ■ 総合点検 □ 5 年 3 回目 定期点検シール記入 ■			
出張・引取	修理 □ 点検のみ □ その他 □ 修理表示貼付 □			

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
・保守点検					
不具合原因、作業内容					
・2017.5/17 リヤット有.					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 30/
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					
・異常あり。大変申し訳ない。修理済み。 (バルブ残 5mpa)					

装置	交換後運転回数：226 + α	更新（リセット）	実施・未実施	殺菌/消毒：	72	殺菌/消毒+アル：	1071	
情報	リークチェック：	0	自己洗浄：	1023	アルコール単独：	0	エア単独：	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	2018 年 5 月 29 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	原田 慎太郎 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	松本