

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 30 年 10 月 17 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100463
作業年月日	平成 30 年 10 月 17 日	作業時間： 1.0 Hr
顧客名	いとう内科クリニック 様	TEL： 0824-64-8880
所在地	広島県三次市東酒屋町354-9	ご担当 様
販売店	ティーエスアルフレッサ (株)	ご担当 宮脇 様
納入年月日	平成 24 年 8 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 6 年 6 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

特に異常は無いです。給水フィルター交換

不具合原因、作業内容

定期メンテナンス作業

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 339
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常は無しです。

装置情報	交換後運転回数： 480 (更新) (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒： 2519	殺菌/消毒+7L： 1273
	リークチェック： 2	自己洗浄： 1535	アルコール単独： 784
			エア単独： 44

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
ポン水濃度計用フィル		☒	1	給水フィルター		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

30.10.17 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 伊藤 雅啓



修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	三戸