

## 保守点検・修理 報告書

|       |                                                                                                                                                                 |                                                                       |       |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/>                                                                      |                                                                       | 製造番号: | 100795       |
| 作業年月日 | 2018 年 11 月 12 日                                                                                                                                                |                                                                       | 作業時間: | 10 Hr        |
| 顧客名   | よりしま内科外科医院 様                                                                                                                                                    |                                                                       | TEL:  | 082-874-0020 |
| 所在地   | 広島県広島市安佐南区祇園6-21-16                                                                                                                                             |                                                                       | ご担当   | 様            |
| 販売店   | 富士フィルムメディカル株式会社 様                                                                                                                                               |                                                                       | ご担当   | 大番 様         |
| 納入年月日 | 2013 年 7 月 9 日                                                                                                                                                  | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品   |              |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 5 年 <input checked="" type="checkbox"/> 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |       |              |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                          |                                                                       |       |              |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・保守点検

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |                                                                               |              |                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.70 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・4時10分殺菌機は正常に動作。

|    |              |                                                                              |            |               |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 装置 | 交換後運転回数: 199 | 更新(リセット) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌/消毒: 5   | 殺菌/消毒+7L: 8/2 |
| 情報 | リークチェック: 0   | 自己洗浄: 527                                                                    | アルコール単独: 0 | エア単独: 0       |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称        | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|---------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤            |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ: 水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ: チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | アルコールサンプ (青)  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

福本 かおり

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店  
 広島県広島市西区庚午中4-10-36  
 TEL: 082-275-0740

責任技術者 作業者

増原

松本