

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号:	301199
作業年月日	2018 年 7 月 18 日		作業時間:	1.0 Hr
顧客名	中央クリニック 様		TEL:	083-922-1771
所在地	山口県山口市中央3-2-43		ご担当	様
販売店	(有)ヤマグチエムイー 様		ご担当	佐々木 様
納入年月日	2017 年 7 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1 年 1 回目 定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・保守点検 (1年目のみ無償)

不具合原因、作業内容

洗浄工程...有り. 分解...無に変更.

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハルス数 35~36
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
☐		☐	

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

・特記事項あり。大変お忙しい中使用頂いておりま。

装置	交換後運転回数: 162	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒: 10	殺菌/消毒+7L: 15.5
情報	リークチェック: 1	自己洗浄: 141	7Lコル単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☐	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名



修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者 作業者

増原

松本