

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号:	300385
作業年月日	2018 年 11 月 29 日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	宮原通りクリニック 様		TEL:	0823-20-0777
所在地	広島県呉市宮原11-3-14		ご担当	様
販売店	富士フィルムメディカル株式会社 様		ご担当	西川 様
納入年月日	2014 年 9 月 30 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4 年 2 回目		定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐		修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・保守点検

・1ヶ月異常履歴有り
・1ヶ月点検
・分解 無効に変更
・基盤交換

不具合原因、作業内容

・下記部品交換

E-10/42-7 流し

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7/ ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・特に異常などはありませんでした。
・吸盤はバネ量が少なくなっており、
・4ヶ月異常などはありませんでした。

装置	交換後運転回数: 620	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 206	殺菌/消毒+アル: 75
情報	リークチェック: /	自己洗浄: 449	アルコール単独: 7	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	3
排水栓		☒	/	接続コネクタ: 水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	/	接続コネクタ: チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/	オゾン濃度計		☒	1
オゾンセンサー		☒	/	アルコール消毒液		☒	1

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名



修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店

広島県広島市西区庚午中4-10-36

TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

