

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 181126

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 広島支店 殿			機種	OED-1000S
客先	1	顧客名			機番	300035
環営	1					
環品	1	所在地			納入日	平成25年06月03日
		点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成30年09月20日
					出荷日	平成30年11月21日
計	3	返送先				

不具合経緯

10/24 フタ開放異常 (E:203)
 ※新鋭工業殿 機械引き上げ。フタリミットスイッチ交換
 11/07 フタ開放異常 (E:203) 再発

不具合原因（故障箇所）と処置

修理遅れまして大変申し訳ありませんでした。下記ご報告いたします。

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

「フタ開放」につきまして、異常が再現することを確認しました。
 コントロール基板～フタリミットスイッチの電気信号が不安定なことが原因でした。
 この基板を交換して復旧しました。（フタリミットスイッチは交換済み）

写真：交換部品一式



〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.69ppm・・・正常
- 3：出荷時の装置情報

交換後運転回数：665 殺菌：5154、殺菌＋アルコール：3792、リークチェック：3774
 自己洗浄：1312、アルコール単独：88、エア単独：5

承認



審査



作成

H30. 11. 26

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	コントロール基板	1 枚	

（株）IHI アグリテック （旧社名 IHIパウ）

岡山県岡山市東区西大寺新地 1 7 0 - 6 TEL:086-944-6528