

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 31 年 3 月 7 日

|       |                                                                                                                               |                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                         | 製造番号： 301109      |
| 作業年月日 | 平成 31 年 3 月 7 日                                                                                                               | 作業時間： 1.0 Hr      |
| 顧客名   | 広島大腸肛門クリニック 様                                                                                                                 | TEL： 082-507-1555 |
| 所在地   | 広島県広島市西区庚午南1-35-21                                                                                                            | ご担当 様             |
| 販売店   | 藤井医療器（株）                                                                                                                      | ご担当 深水 様          |
| 納入年月日 | 平成 29 年 3 月 23 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 2 年 2 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>        |                   |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

H31 年 定期メンテナンス 実施

点検項目

|          |                                                                               |              |                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 270                                    | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 410    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.71 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
|          | <input type="checkbox"/>                                                      |              | <input type="checkbox"/>                           |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

動作点検後、特に問題なし

|      |                              |             |                |
|------|------------------------------|-------------|----------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数： 1606 更新（リセット）実施・未実施 | 殺菌/消毒： 1150 | 殺菌/消毒+7L： 1792 |
|      | リークチェック： 0                   | 自己洗浄： 550   | 7L単独： 59       |
|      |                              |             | エア単独： 0        |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| ワゴン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| ワゴン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| ワゴン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | IS-10 フィルタ   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

中島夏太郎

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店  
広島県広島市西区庚午南4-10-36  
TEL：082-275-0740

責任技術者 作業者

増原

三戸