

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ■		製造番号:	300631
作業年月日	2018 年 10 月 5 日		作業時間:	1.0 Hr
顧客名	にしみ内科クリニック 様		TEL:	0827-44-2437
所在地	山口県岩国市錦見6-14-31		ご担当	様
販売店	ティーエスアルフレッサ(株)岩国 様		ご担当	若木 様
納入年月日	2015 年 9 月 28 日	保証期間 内 □ 外 ■	付属品	
作業区分	保守点検 ■ 総合点検 □ 3 年 3 回目 定期点検シール記入 ■			
出張・引取	修理 □ 点検のみ □ その他 □ 修理表示貼付 □			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・保守点検

不具合原因、作業内容

排水は流れて ハウジング取り外し シェア-無し

点検項目

フタロック	正常	✓	殺菌槽 LED	正常	✓
酸素ライン	正常	✓	エアライン	正常	✓
アルコールライン	正常	✓	オゾン水濃度計動作	正常	✓
オゾンセンサ	正常	✓	排水栓、排水ライン	正常	✓
給水ライン	正常	✓	細管送水ライン	正常	✓
濃度計流量	正常	✓	排気ライン	正常	✓
水位センサー	正常	✓	オゾン濃度	正常	✓
水漏れ確認	正常	✓	異常音、振動	正常	✓
清掃	正常	✓	電源コード	正常	✓
トレイ	正常	✓	殺菌チューブ類	正常	✓
殺菌槽コネクタ	正常	✓	マニホールド周辺チューブ	正常	✓
	□			□	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特記事項はなしです。
 25-10 缶（新水、洗浄缶）赤色 9月頃
 (エトフレッシュ使用)

装置	交換後運転回数: 964	更新(リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒: 89/	殺菌/消毒+7L: 1.418
情報	リークチェック: 4	自己洗浄: 1	アルコール単独: 34	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		✓	1	吸盤		□	
排水栓		✓	1	接続コネクタ: 水槽側		□	
オゾン水濃度計		✓	1	接続コネクタ: チューブ側		□	
オゾン水濃度計用フィルタ		✓	1			□	
オゾンセンサー		✓	1			□	

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

宮岡

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

増原

松本