

管理 No. 20181017-03

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号:	100796
作業年月日	2018年10月17日	作業時間:	1.5 Hr
顧客名	市川医院 様	TEL:	0833-72-5700
所在地	光市中央3-2-26	ご担当	様
販売店	海#医科器械(株)周南	ご担当	多田 様
納入年月日	2013年8月23日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5年5回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検

不具合原因、作業内容

シンク排水(フィルタ-無)、アルコール未使用、基盤交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 343	エアライン	正常 ☒ 30~31
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハルス数 411
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒ 左上セパ有り	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ 交換
☐		☐	

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

特に内蔵バグのトラブル。

装置	交換後運転回数: 421	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒: 1.726	殺菌/消毒+アル: 0
情報	リークチェック: 0	自己洗浄: 931	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	又: チューブ		☒	5
オゾンセンサー		☒	1	1000番		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

河岡

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者 作業者

増原 松本

Ver.3.1