

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 30年 10月 9日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300529
作業年月日	平成 30 年 10 月 9 日		作業時間： Hr
顧客名	鼓ヶ浦整肢学園 様		TEL： 0834-29-1430
所在地	山口県周南市久米752-4		ご担当 池田先生 様
販売店	株式会社特殊ガス商会		ご担当 嶋村 様
納入年月日	平成 27 年 4 月 13 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

消毒時給水異常 (E-202)、異音

不具合原因、作業内容

現地にて試運転 4日実施 (H30 10/10)

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 287	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 510
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

下記部品を交換し消毒時給水異常対応、異音については、部品交換後再現しませんでした。

その他特に異常なし。

装置情報	交換後運転回数： 62	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 516	殺菌/消毒+7L： 456
	リークチェック： 0	自己洗浄： 551	アルコール単独： 0	エア単独： 7

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		パルスセンサー		☒	3
排水栓		☐		コントロール基盤		☒	1
オゾン水濃度計		☐		電磁弁		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☐				☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

30 年 10 月 10 日

ご署名

池田 先生



修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者	作業者
嶋村	池田