

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 181119

配布先	顧客名	ながしまクリニック 様	機種	OED-1000S
客先	所在地	広島県広島市佐伯区吉見園2-33	機番	300187
環営	電話	082-922-2151	納入日	平成26年03月03日
環品	点検者	新鋭工業（株）松本・IHIAグリテック 中澤	受付日	平成30年11月14日
計	返送先		出荷日	

修理依頼・不具合内容

電源が入らない

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果

分解点検したところ、直流電源が故障しておりました。
電源に異物や水がかかった形跡は無く、部品の単発故障と推察いたします。
この電源に関連する電気部品を念のために交換いたしました。

写真1：タッチパネル画面

写真2：交換部品一式

型式	OED-1000S
製造番号	300187
プログラム	Ver. 0207/1040
納入年月日	14/03/03
前回定期交換日	18/10/22
交換後運転回数	10
運転回数(消毒)	15
運転回数(消毒+アル)	444
運転回数(リークチェック)	0
運転回数(自己洗浄)	428
運転回数(7分30秒単独)	
運転回数(17分単独)	
2018/11/19	



[2] 作業内容

- 1：分解点検および部品交換・・・新鋭工業（株）広島支店にて実施
- 2：運転確認・・・正常
- 3：引き取り時の運転情報・・・写真1参照

承認



審査



作成

H30.11.19
中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	直流電源	1個	
	コントロール基板	1枚	
	タッチパネル	1台	

（株）IHIAグリテック（旧社名：IHISHIBAWA）

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528