

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号:	300035 <i>B</i>
作業年月日	2019 年 5 月 27 日		作業時間:	1.0 Hr
顧客名	三次地区医療センター 様		TEL:	0824-62-1103
所在地	三次市十日市東3-16-1		ご担当	倉本 様
販売店	ティーエスアルフレッサ(株)三次 様		ご担当	竹本 様
納入年月日	2013 年 6 月 3 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 6 年 6 回目 定期点検シール記入 ☒			
<i>出張・引取</i>	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・保守点検

*給水、酸素ラインの洗浄。
(バルブ開け忘れ) 洗浄-終了*

不具合原因、作業内容

・下記部品交換

排水ファウズ・フタ取り外し。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ <i>X38</i>	エアライン	正常 ☒ <i>33-34</i>
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ <i>バルブ数 27X</i>
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ <i>履歴 0.70 ppm</i>
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ <i>清掃 ☒</i>	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題はありませんでした。

装置	交換後運転回数: <i>1700</i>	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: <i>5/02</i>	殺菌/消毒+アル: <i>3669</i>
情報	リークチェック: <i>3.665</i>	自己洗浄: <i>1.279</i>	アルコール単独: <i>77</i>	エア単独: <i>3</i>

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☐	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド・チューブ		☐	1セット
オゾンセンサー		☒	1	排水フィルター 新・旧		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

給水、E202R 1 年 5 月 27 日

草川 和子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

増原

松本