

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2019 年 5 月 10 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300507
作業年月日	2019 年 5 月 10 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	防府リハビリテーション病院 様		TEL: 0835-32-1777
所在地	山口県防府市台道 1634-1		ご担当 様
販売店	テ-エス307V.サ(株)		ご担当 様
納入年月日	2015 年 2 月 31 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4 年 4 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

保守点検部品の交換, 排水スワッチ取付

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☐
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 400
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒ 次回交換
		☐	Ver. 0205 / T02C		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常なし, 大変スムーズに御使用頂き有難うございます。

装置情報	交換後運転回数: 115	更新(リセット)実施・未実施	殺菌/消毒: 4	殺菌/消毒+アル: 767
	リークチェック: 468	自己洗浄: 38	アルコール単独: 1	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☐	
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☐	
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☐	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 5 月 10 日

ご署名 山本美由紀 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
瑞原	松植