

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号:	300844
作業年月日	2019 年 6 月 3 日		作業時間:	1.0 Hr
顧客名	野村病院 様		TEL:	082-875-1111
所在地	広島市安佐南区祇園2-42-14		ご担当	様
販売店	(株)中村酸素 様		ご担当	南部 様
納入年月日	2016 年 5 月 13 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 3 回目 定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・保守点検

10/5、ホバ70-レベルがカ)異常有り。

不具合原因、作業内容

・下記部品交換

・シャワ- 蓋→有に交換。
・排水ホース ハウジング 取外し

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・4月16日修理完了にて、お詫言います。

装置	交換後運転回数: 290	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 108	殺菌/消毒+アル: 933
情報	リークチェック: 0	自己洗浄: 1.067	アルコール単独: 13	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☐	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☐	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	23
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド・チューブ		☐	1セット
オゾンセンサー		☒	1	排水フィルター 新・旧		☐	1

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

加藤 篤

加藤 篤

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者 作業者

増原

松本