

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 31 年 1 月 9 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300188
作業年月日	平成 31 年 1 月 9 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	マッターホルンハビテーション病院(クリニック広島健診) 様		TEL： 0823-22-6868
所在地	広島県呉市中通1丁目5-25		ご担当 様
販売店	有限会社 平原商会 様		ご担当 平原会長 様
納入年月日	平成 26 年 3 月 18 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5 年 3 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

保守点検 部品の交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 420
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ 交換
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常なし。大変きれいにて使用いたがを有難うございます。

装置情報	交換後運転回数： 776	更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒： 1376	殺菌/消毒+アル： 1374
	リークチェック： 1386	自己洗浄： 902	アルコール単独： 217	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	4
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィル		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	5
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 1 月 9 日

ご署名

武田 至子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	三戸