

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2019 年 8 月 20 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 100256
作業年月日	2019 年 8 月 20 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	内科内視鏡消化器科 様		TEL: 0120-519-323
所在地	山口県宇部市康波 2-5-26		ご担当 様
販売店	(有) 新和医科器械		ご担当 様
納入年月日	2011 年 6 月 22 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 8 年 8 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検

不具合原因、作業内容

定期保守点検部品の交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 295
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒ 排水ポンプの音
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒ 正常	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

トレー 正常, 排水ポンプの音 現状問題なし、その他 異常なし。

装置情報	交換後運転回数: 734	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒: 3840	殺菌/消毒+7L: 1129
	リークチェック: 5	自己洗浄: 1161	アルコール単独: 3	エア単独: 7

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 8 月 20 日

ご署名 中尾 彩乃



修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
中尾 彩乃	中尾 彩乃