

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号:	300381
作業年月日	2019 年 8 月 20 日		作業時間:	Hr
顧客名	光市立大和総合病院 様		TEL:	0820-48-2111
所在地	光市菅田974		ご担当	杉本 様
販売店	三興医療用品(株)		ご担当	松本 様
納入年月日	2014 年 10 月 21 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☒ 5 年 回目		定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐		修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴 → XGL.

・分解XGL
・シャワ-あり.

不具合原因、作業内容

・下向き部品交換
・水排ガス XGL (大)

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレ-	正常 ☒ 左上にあり.	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置	交換後運転回数: 1,585	更新(リセット) (実施)・未実施	殺菌/消毒: 3,231	殺菌/消毒+アル: 3,897
情報	リークチェック: 3,763	自己洗浄: 1,115	アルコール単独: 10	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☐	2
ワゴン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☒	23
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド・チューブ		☐	1セット
オゾンセンサー		☒	1	排水フィルタ 新・旧		☐	1

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 8 月 20 日

ご署名 行友恭平 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増子	杉本