

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成29年 8 月 9 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300038
作業年月日	29年 平成 年 8 月 9 日		作業時間：1.0 Hr
顧客名	西医院 様		TEL：0823-56-0508
所在地	広島県広島市東区藤原 2-19-3		ご担当 様
販売店	(有) 平原商会		ご担当 広瀬 様
納入年月日	平成 2013 年 6 月 18 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☒ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
排水異常			
不具合原因、作業内容			
排水フィルター 交換 給水フィルター			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハルス数 335
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
交換後は問題ございません。			

装置情報	交換後運転回数：393	更新（リセット）実施・未実施 ☒	殺菌/消毒：684	殺菌/消毒+7L：1614
	リークチェック：4	自己洗浄：1079	アルコール単独：3	エア単独：2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐		排水フィルター		☒	1
オゾンセンサー		☐		給水フィルター		☒	1

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL：082-275-0740

責任技術者	作業者
	増原