

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号:	300360
作業年月日	2019 年 8 月 26 日		作業時間:	4.0 Hr
顧客名	柴田病院 様		TEL:	0839-27-2800
所在地	山口県山口市大内矢田北5-11-21		ご担当	様
販売店	(株)特殊ガス商会 様		ご担当	浜中 様
納入年月日	2014 年 8 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5 年 5 回目 定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
・保守点検 (前回: 2018/9/21)	分解...なし.
・タッチパネル故障 (履歴削除) 基盤も併せて交換	シャワ...あり.
・機器から異臭	交換...1ヶ月ほど経ち (9/26)
不具合原因、作業内容	
・下記部品交換	
・異臭...排水溝から上がってきている (排水ホースASSY交換) カビ等多	
・排水ホース交換 (長めにしてウォータートラップ作成)	・排水ファウジング 取り外し
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 342
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
試運転後、特に異常はございません	
異臭の原因は排水の配管からなので、再発した場合は下水の点検・工事を推奨致します	

装置 情報	交換後運転回数:	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒:	殺菌/消毒+7L:
	リークチェック:	自己洗浄:	アルコール単独:	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☐	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☐	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド・チューブ		☐	1セット
オゾンセンサー		☒	1	メイン基板		☒	1
タッチパネル		☒	1	排水ホースASSY		☒	1セット

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 8 月 28 日

ご署名

亀永 克子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者 作業者

増原

松本