

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 31 年 3 月 11 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300821
作業年月日	平成 31 年 3 月 18 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	北広島病院 健康管理室 様		TEL： 0826-72-2050
所在地	広島県山県郡北広島町壬生433-4		ご担当 様
販売店	多田医療器株式会社		ご担当 今田 様
納入年月日	平成 28 年 3 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 3 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

H31年定期メンテナンス実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 278	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 610
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

洗浄消毒 2ネグワ-パッキン劣化の為、交換してください。

装置 情報	交換後運転回数： 1275	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 735	殺菌/消毒+7L： 540
	リークチェック： 0	自己洗浄： 0	アルコール単独： 16	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		吸盤		☒	1
排水栓		☒		接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒		接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒		マニホールド周辺チューブ		☒	5
オゾンセンサー		☒		アルコールキャップ		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H31年 3 月 18 日

ご署名 今田 久美子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者

増原

作業者

三戸