

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2019 年 9 月 11 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300160
作業年月日	2019 年 9 月 11 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	山内病院 様		TEL: 0898-32-3000
所在地	愛媛県今治市片山3-1-40		ご担当 様
販売店	(特) 352-メテカIV		ご担当 山本 様
納入年月日	2013 年 12 月 9 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 6 年 6 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

排水異常 E401 (片山側)

不具合原因、作業内容

保守点検部品、交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 375	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 632
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒ 若干心音	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺フューズ	正常 ☒
	☐	Ver 0204 T02PV	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

排水異常なし、大変きれいになりました。御使用の機器は有難うございます。

装置 情報	交換後運転回数: 528	更新 (リセット) (実施)・未実施	殺菌/消毒: 1284	殺菌/消毒+アル: 1599
	リークチェック: 1	自己洗浄: 1346	アルコール単独: 0	エア単独: 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	2
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☒	2
オゾン水濃度計 (LED)		☒	1	接続コネクタ: フューズ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 9 月 11 日

ご署名 岡村 梨枝



修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
岡村 梨枝	山本 様