

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号:	300846
作業年月日	2019 年 4 月 4 日		作業時間:	1.0 Hr
顧客名	山下ケアクリニック 様		TEL:	0827-54-0852
所在地	大竹市新町1-2-7-101		ご担当	様
販売店	ティーエスアルフレッサ(株)岩国 様		ご担当	新上 様
納入年月日	2016 年 4 月 22 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 3 回目		定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐		修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
・保守点検	
不具合原因、作業内容	
・下記部品交換	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 280	エアライン 正常 ☒ 33~35
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルス数 6.6
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
特記事項: 4/10/2019 年 4 月 4 日 保守点検完了。	

装置 情報	交換後運転回数: 87	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒: 5	殺菌/消毒+7L: 370
	リークチェック: 0	自己洗浄: 364	7Lコル単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド・チューブ		☐	1セット
オゾンセンサー		☒	1	排水フィルター 新・旧		☐	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

431 年 4 月 4 日

ご署名

山下 久 義 (印)

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	松本