

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2019 年 4 月 2 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300822
作業年月日	2019 年 4 月 2 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	吉野内科 様		TEL: 089-979-5133
所在地	愛媛県松山市平田町 19-2		ご担当 様
販売店	大和産業工業 (株)		ご担当 仙波 様
納入年月日	2016 年 3 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 5 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

保守点検部品交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 587
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺フューズ	正常 ☒
	☐	Ver. 0207 / T02C	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常なし、大変スムーズに御使用頂いております。

装置情報	交換後運転回数: 296	更新 (リセット) (実施)・未実施	殺菌/消毒: 145	殺菌/消毒+7L: 630
	リークチェック: 763	自己洗浄: 503	アルコール単独: 3	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; フューズ側		☐	
オゾン水濃度計用フィル		☒	1	排水フューズ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	排水ホース		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

H31 年 4 月 2 日

田永幸子 印

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
田永	田永