

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号:	300263
作業年月日	2019 年 4 月 8 日		作業時間:	1.0 Hr
顧客名	たかば内科医院 様		TEL:	0824-44-2025
所在地	三次市三良坂町三良坂1096-3		ご担当	様
販売店	ティーエスアルフレッサ(株)三次 様		ご担当	川本 様
納入年月日	2014 年 9 月 8 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4 年 4 回目		定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐		修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・保守点検

排水異常 x1. → 排水口 取っ外し (排水口の為)

不具合原因、作業内容

・下記部品交換

減圧弁 O₂ リン交換 (予備品使用) → O₂ リン有り (減圧弁の為?)

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

特記事項: 排水口の取っ外し。減圧弁のO₂ リン交換。交換完了。

装置	交換後運転回数: 200	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 610	殺菌/消毒+7L: 152
情報	リークチェック: 1	自己洗浄: 722	アルコール単独: 0	エア単独: 632

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☐	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド・チューブ		☐	1セット
オゾンセンサー		☒	1	排水フィルタ 新・旧		☐	1

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

高梨 絹代 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者 作業者

増原

松本