

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 1 年 10 月 10 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300362
作業年月日	令和 1 年 10 月 10 日	作業時間： 1.25 Hr
顧客名	向井クリニック 様	TEL： 0829-50-6166
所在地	広島県廿日市市前空5-3-16	ご担当 院長 様
販売店	富士フィルムメディカル 藤井医療器(株)	ご担当 吉原政村 様
納入年月日	平成26年 8月 18日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

定期点検保守作業

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 341	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 575
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
☐		☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・ 下記部品交換 特に問題ありません。大変キレイにお使い頂き有り難うございます。

装置 情報	交換後運転回数： 515 更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 7	殺菌/消毒+アル： 2821
	リークチェック： 240 自己洗浄： 107	アルコール単独： 3	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
ワゴン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	1	タッチパネル		☐	
オゾンセンサー		☒	1	基盤		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 10 月 10 日

ご署名

向井 俊一



修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者 作業者

増原

三戸