

保守点検・修理 報告書

管理 No.

20191016

発行日： 2019 年 10 月 16 日

販売名 / サービス番号 Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号 50026
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業年月日 2019 年 10 月 16 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	作業時間 Hr
顧客名	やすクリニック 様	TEL: 082-878-7101
所在地	広島県広島市安佐南区上安1丁目1-18	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2018 年 10 月 11 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1 年 1 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
2019年 保守点検	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 500k x2 3% 7.5MPa	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ 表示数 1044
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒ ビニール袋でのみ	殺菌/消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0303 / T12A
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
異常ありませんでした	

装置 情報	交換後運転回数: 128 → 0 更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 13 / 12	殺菌/消毒+7L: 115 / 114
	リークチェック: 126	自己洗浄: 92	7L/10L単独: 2 エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1
交換後 No. 15082095		
オゾンセンサー	☒	1
	☐	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1
排水栓	☒ 1
接続コネクタ; 水槽側	☐
接続コネクタ; チューブ側	☐
ポンプ水濃度計用フィルタ	☒ 1

交換部品名称	交換・数量
吸盤	☒ 3
エアフィルター	☒ 1
水フィルター	☒ 1
	☐
	☐

お客様ご確認署名欄	2019 年 10 月 16 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	ご署名 井上 基樹 印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シパウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者	作業者
R01.10.16 中	中