

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号:	300262
作業年月日	2019 年 5 月 21 日		作業時間:	15 分 10 Hr
顧客名	山東クリニック 様		TEL:	082-870-7000
所在地	安佐南区緑井3-14-8		ご担当	様
販売店	(株)中村酸素 様		ご担当	南部 様
納入年月日	2014 年 5 月 14 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5 年 5 回目 定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
・保守点検	たみ電機、内落し、点検、分解無し
不具合原因、作業内容	
・下記部品交換	タッチパネル、基板交換
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 309	エアライン 正常 ☒ 33235
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 507
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒ 左下にヒビあり	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置	交換後運転回数: 529	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 140	殺菌/消毒+7ル: 1.034
情報	リークチェック: 1.027	自己洗浄: 121	アルコール単独: 2	エア単独: 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☐	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	23
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド・チューブ		☐	1セット
オゾンセンサー		☒	1	排水フィルタ 新・旧		☐	1

お客様ご確認署名欄

年 19 月 5.21 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

山東敬弘

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者 作業者

増原

松本