

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 平成2019年5月22日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300444
作業年月日	平成2019年5月22日		作業時間: 2.5 Hr
顧客名	主協宇摩診療所 様		TEL: 0896-25-0114
所在地	愛媛県四国中央市寒川町2912-1		ご担当 様
販売店	高松市西 (株)		ご担当 毛利 様
納入年月日	平成2015年2月9日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年々回目 定期点検シール記入 ☒		
出張 引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

スチールパネル操作不能, 保守点検

不具合原因、作業内容

保守部品交換, スチール・コントロール盤交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 383	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バル数 385
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒ 3877交換
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	Ver 0207 / T04C	☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

・ 点検完了。大変中に異常発生せず。
・ 保守点検に必要部品は、すべて正常動作を確認した。

装置情報	交換後運転回数: 310	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 989	殺菌/消毒+7L: 449
	リークチェック: 0	自己洗浄: 234	アルコール単独: 7	エア単独: 5

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	スチール・コントロール盤		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールドチューブ		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019年5月22日

ご署名

鈴木 利紀

鈴 印

修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

鈴木 利紀

鈴木 利紀