

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号:	301173
作業年月日	2019 年 6 月 24 日		作業時間:	1.0 Hr
顧客名	福山城西病院 様		TEL:	084-926-0606
所在地	福山市西町2-11-36		ご担当	大森 様
販売店	五洋医療器株式会社 様		ご担当	松山 様
納入年月日	2017 年 5 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
・保守点検 排水栓異常発生 分解あり → シンク排水 → 排水口の掛け忘れ(コック)	
不具合原因、作業内容	
・下記部品交換 排水栓交換あり。(清掃方法の説明)	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 24X	エアライン 正常 ☒ 34-35
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ ハルス数 504
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.66 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項 特記事項等 2-4 はお直し。 消毒ボイル使用済。12 枚交換済み。	

装置 情報	交換後運転回数: 67	更新(リセット)実施・未実施	殺菌/消毒: //	殺菌/消毒+7L: 150
	リークチェック: 22	自己洗浄: 96	7Lコールド: /	エア単独: 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☐	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド・チューブ		☐	1セット
オゾンセンサー		☒	1	排水フィルター 新・旧		☐	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R2 年 6 月 24 日

ご署名 小田 琴 絵 (印)

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	松本