

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 0ED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 0ED-1000S ☐		製造番号:	1
作業年月日	2019 年 7 月 5 日		作業時間:	1.
顧客名	水入クリニック 様		TEL:	082-962-
所在地	広島市東区牛田早稲田1-23-8		ご担当	
販売店	藤井医療器株式会社 様		ご担当	深水
納入年月日	2013 年 8 月 9 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 6 年 ☒ 回目 定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・保守点検

不具合原因、作業内容

・下記部品交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置	交換後運転回数: 189	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒: 4/	殺菌/消毒+アル: 9
情報	リークチェック: 2	自己洗浄: 768	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☐
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド・チューブ		☒
オゾンセンサー		☒	1	排水フィルター 新・旧		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

兼国利貞

責任技術者

作