

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2019 年 8 月 9 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300599
作業年月日	2019 年 8 月 9 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	年光医院 様		TEL: 0834-62-1100
所在地	山口県周南市新地町 1-27		ご担当 様
販売店	(株) 特殊カス商会		ご担当 嶋村 様
納入年月日	2015 年 7 月 22 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4 年 4 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
定期保守点検	
不具合原因、作業内容	
定期保守点検部品交換	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 3/8	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 64/
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
	Ver. 0207 / TACC ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
対応は異常なし、大変スムーズに御役(1)頂上有難うございます	

装置 情報	交換後運転回数: 7/	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 3	殺菌/消毒+7L: 308
	リークチェック: 1	自己洗浄: 307	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	給水チューブ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		1 年 8 月 9 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		ご署名 年光 宗明 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
嶋村	西 穂