

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2019年 8月 23日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒			製造番号：	300598
作業年月日	2019 年 8 月 27 日			作業時間：	1.5 Hr
顧客名	石原内科胃腸科			様	TEL： 084-947-1177
所在地	広島県福山市幕山台1-20-20			ご担当	様
販売店	福山医療器株式会社			ご担当	高田 様
納入年月日	2015 年 6 月 29 日		保証期間 内 □ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 □	4 年 4 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 □	点検のみ □	その他 □	修理表示貼付 □	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

2019年定期メンテナンス実施

点検項目

フタロツク	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライオン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 478
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサ	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒ 交換(8月27日)
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	モニホール周辺ケーブル	正常 ☒ "
	☐		☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

特に問題ございません。

装置情報	交換後運転回数： 579	更新 (リセツト) 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒： 1184	殺菌/消毒+7W： 1214
	リークチェツク： 854	自己洗浄： 1200	7W単独： 0	エア単独： 4

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用ケーブル		☒	1	モニホールケーブル		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

2019 年 8 月 27 日
田中 健二 印

修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店

広島県広島市西区庚午中4-10-36

TEL：082-275-0740

責任技術者

増原

作業者

増原

Ver.3.1