

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号:	300734
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1	作業日:	2020年3月13日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間:	Hr
顧客名	梶川病院 様	TEL:	082-251-1151
所在地	広島県広島市西区天満町8-7	ご担当	杉岡 様
販売店	共和医理器株式会社 様	ご担当	木戸 様
納入年月日	2016年2月22日	保証期間	内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 ☒ 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有 ☒ 無 ☐	シャワー	有 ☒ 無 ☐
・保守点検	排水下取外し		分解	有 ☒ 無 ☐
	機器下の排水口ホース接続 (シンク下使用不可、水漏れあり)			

不具合原因、作業内容	
・下記部品交換	下台 USB1 copy
	排水下取外し (ホース接続の Assy の誤り) シンク下台と直接

点検項目		点検結果	
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ (110g/L)	エアライン	正常 ☒ 3ヶ所
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 503
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒
		プログラム ver	正常 ☒ Ver 0207/1702c

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	排水下台と直接接続
----------------------------	-----------

装置	交換後運転回数: 2/0	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 93	殺菌/消毒+アル: 1.032
情報	リークチェック: 1.002	自己洗浄: 568	アルコール単独: 7	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☐	3		☐	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。	
ご署名	杉岡 牙子

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	松本