

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号:	30/120
作業年月日	2019 年 9 月 10 日		作業時間:	1.0 Hr
顧客名	吉見内科小児科医院 様		TEL:	082-842-5644
所在地	安佐北区口田3-28-11		ご担当	様
販売店	富士フイルムダイカル 様		ご担当	大番 様
納入年月日	2017 年 7 月 18 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検 (定期)

E=200
E=202) 問題なし

・シャワ-有り

・分解 有り

(シンク)

・給排水フィルター無し

不具合原因、作業内容

下記部品交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 203	エアライン	正常 ☒ 35-36
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 479
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.66 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

・材料問題はございません

装置	交換後運転回数: 174	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 181	殺菌/消毒+アル: 38
情報	リークチェック: 0	自己洗浄: 21	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☐	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド・チューブ		☐	1セット
オゾンセンサー		☒	1	排水フィルター 新・旧		☐	1

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

11/1

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

増原

松本