

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	☐	Ver. 3.1	製造番号: 右 301249
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S	☒	Ver. 3.1	作業日: 2020年4月9日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus	☐	Ver. 1.0	作業時間: 10 Hr
顧客名	広島中央健診所 様			TEL 082-228-1177
所在地	広島市中区八丁堀10-10			ご担当 宮田 様
販売店	(株)エバルス 様			ご担当 末田 様
納入年月日	2017 年 8 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☒	3 年 5 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴 (有・無) ☒ 有	シャワー	有・無 ☒ 有
・保守点検	オゾン水内視鏡点検	分解	有・無 ☒ 有
	1/22, 2/19, 3/12, 4/8	給・排水F	有・無 ☒ 有

不具合原因、作業内容
・下記部品交換

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 350	エアライン	正常 ☒ 35~36
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 392
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒
		プログラムver	正常 ☒ Ver 0207/ TAJC

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置	交換後運転回数: 1613	更新 (リット) (実施)・未実施	殺菌/消毒: 6425	殺菌/消毒+7L: 1988
情報	リークチェック: 4273	自己洗浄: 645	アルコール単独: 126	エア単独: 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 10040133			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 150316-004			水槽側コネクタ	☒	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。
ご署名 宮田 恵子

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL : 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	松本